

MANUAL DE USUARIO

ZAR - CQP - 011

Quiropráctica

Zarmex Oficial

ZARMEX

Ofrecemos calidad en cada uno de nuestros productos y servicios

Zarmex inició ofreciendo servicios médico-dentales y de optometría. Con el tiempo, ha expandido su catálogo a áreas como podología, quiropráctica, otorrinolaringología, ginecología y fisioterapia. Su crecimiento ha sido impulsado por la innovación y la calidad en la manufactura y mantenimiento de equipos médicos.

TÚ GUÍA INTERACTIVA

Nuestro manual incluye un menú dinámico diseñado para facilitar tu experiencia de navegación. A través de él, puedes acceder rápidamente a las secciones que necesites sin tener que buscar manualmente. Solo haz clic en el título o apartado que te interese, y serás dirigido directamente a esa parte del documento.

MENÚ

[INTRODUCCIÓN](#)

[PIEZAS](#)

[INSTALACIÓN](#)

[GARANTIA](#)

[MANTENIMIENTO](#)

[RECOMENDACIONES](#)

[CONTACTO](#)

BIENVENIDO A LA EXPERIENCIA ZARMEX

¡Gracias por adquirir nuestro equipo!

Te compartimos tu manual el cual ha sido diseñado para proporcionarte una guía clara y concisa sobre el uso, mantenimiento y características técnicas del modelo descrito, tu equipo está pensado para ofrecer comodidad, eficiencia y durabilidad en entornos profesionales.


Te recomendamos leer detenidamente tu manual antes de su uso para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro.

PÓNLO EN MARCHA EN MINUTOS

En Zarmex, pensamos en tu comodidad desde el primer momento. Por eso, entregamos cada equipo completamente ensamblado, listo para usarse, sin que tengas que preocuparte por armado o instalación complicada.

Sabemos que tu tiempo es valioso, nuestro objetivo es que recibas un equipo práctico, funcional y sin complicaciones, como debe ser. En Zarmex, estamos contigo en cada paso.

TU EQUIPO ZARMEX PIEZA POR PIEZA

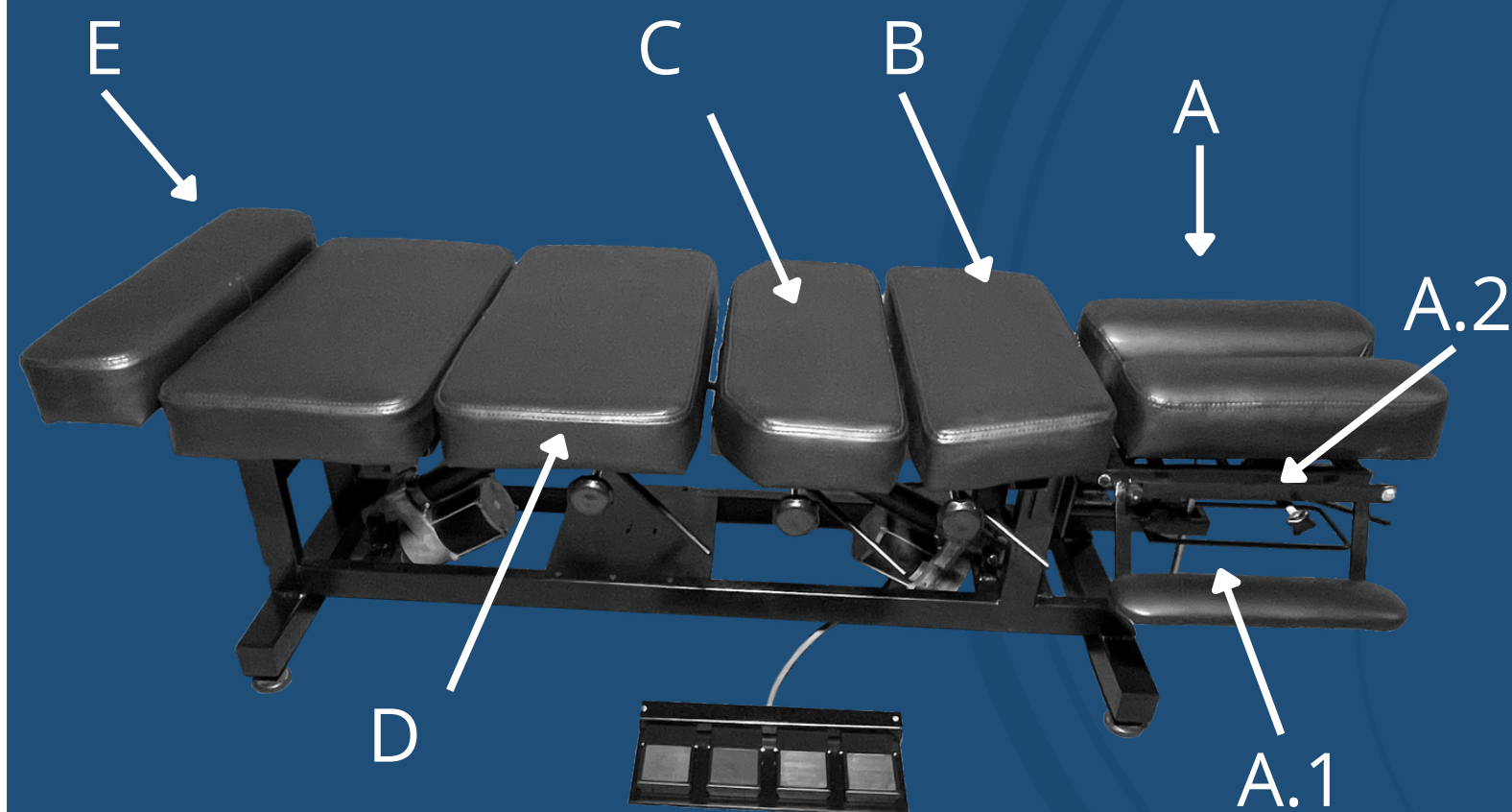

A. Sección Cervical: Drop cervical con caída a 45°, activación de drop mediante palancas y perilla. **A.1:** flexión y extensión ajustable controlado por pistón para posicionar correctamente la zona cervical del paciente al momento del ajuste. **A.2:** Corta papel facial.


B. Sección Torácica: Incluye drops torácico y lumbar. Activación de drop mediante palancas y perilla. Sección B y C pueden realizar una angulación superior de 20° e inferior de 15° gracias al sistema motorizado controlado por pedal.

C. Sección Lumbar: Posee un drop lumbar, activación de drop mediante palancas y perilla. Sección B y C pueden realizar una angulación superior de 20° e inferior de 15° gracias al sistema motorizado controlado por pedal.

D. Sección pélvica: Cuenta con drop pélvico que se activa mediante palancas y perilla. Realiza movimiento angulatorio superior hasta 35° controlado por control al pie.

E. Piecera Extensible: Se extiende hasta 15 cm para adaptarse a pacientes de diferentes estaturas.

TU EQUIPO ZARMEX PIEZA POR PIEZA

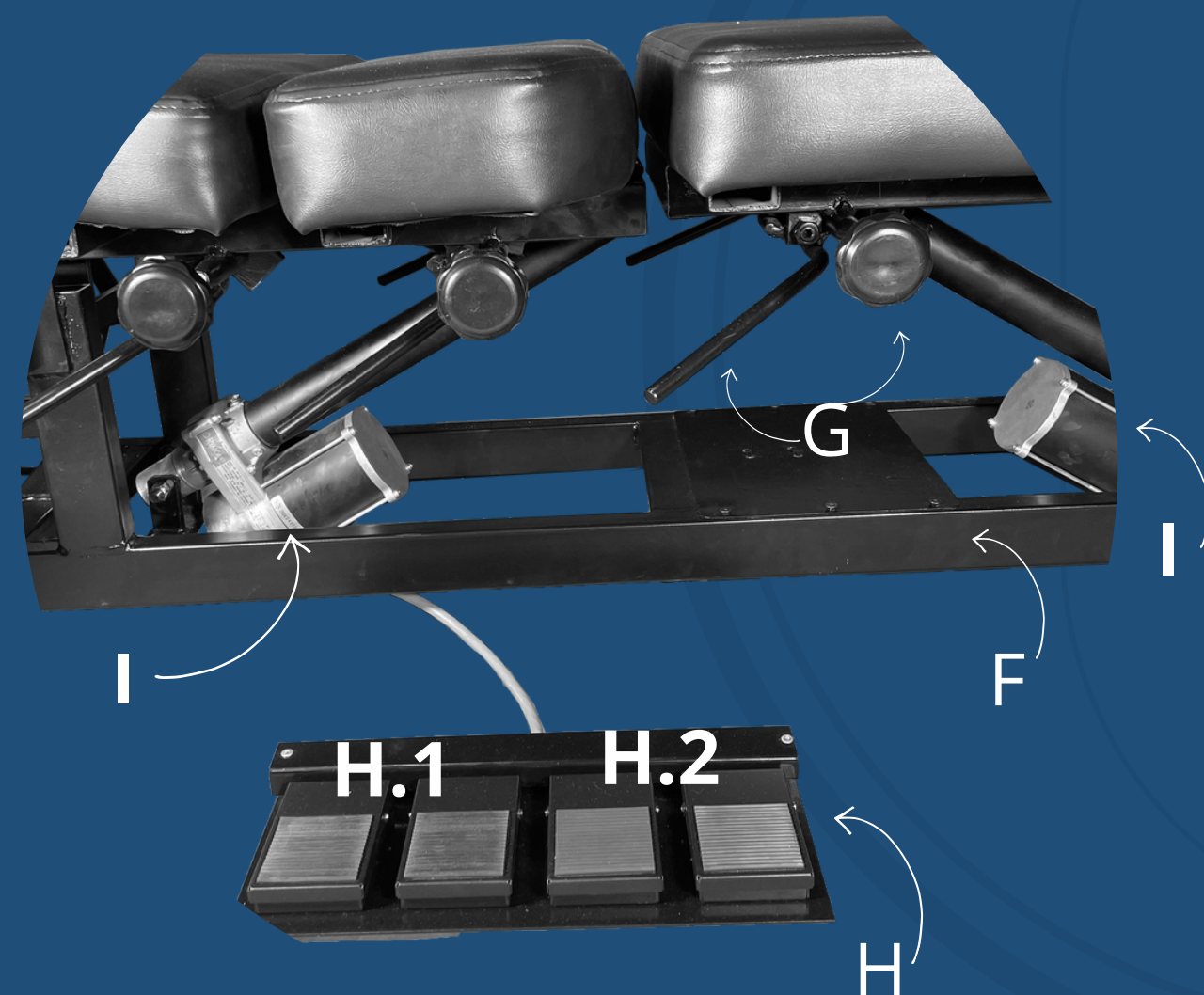

F. Estructura Metálica: Proporciona resistencia, estabilidad y durabilidad al equipo.

G. Palancas y perillas: Activa el mecanismo del drop. Su diseño oculto mejora la estética y seguridad del equipo.

H. Pedales eléctricos al piso: Permiten controlar los dos motores eléctricos sin usar las manos. **H.1:** ajuste de la angulación pélvica **H.2:** Ajuste de la angulación torácolumbar, facilitando la labor del profesional.

I. Motores eléctricos (2 x 4000 N, 110V): Proveen la movilidad eléctrica de la mesa realizando movimientos suaves y silenciosos.

GARANTÍA

Condiciones

- Es necesario presentar la póliza, la factura o nota de compra y llevar el producto a la dirección de ZARMEX.
- Para más información ZARMEX se compromete a reparará o sustituirá el producto o sus piezas defectuosas sin costo, incluyendo el envío o transporte.
- ZARMEX se reserva al derecho a remplazar el equipo.

Duración

La garantía ofrecida por ZARMEX tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de compra, y cubre todas las partes del producto contra defectos de fabricación o fallas en su funcionamiento.

Anulación:

La garantía se pierde por mal uso, no seguir el instructivo o reparaciones no autorizadas.

Exclusiones:

No cubre daños por voltaje, mal uso, desgaste normal o falta de documentos.

Condiciones extra:

ZARMEX puede enviar un técnico o dar un equipo provisional si aplica. No se aceptan garantías verbales.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO

En nuestra página web contamos con una sección específica donde puedes detallarnos el problema que presenta el modelo. Una vez recibido tu mensaje, nos comunicaremos contigo de inmediato para brindarte una solución.

Mantenimiento preventivo :

Se recomienda realizar mantenimiento básico regularmente: limpiar el polvo, revisar tornillos.

Limpieza:

Zarmex recomienda que, para una mejor limpieza de tu equipo, especialmente en las áreas forradas con vinil, utilices silicón en crema o productos base en crema y un trapo de microfibra. Esto garantizará un mejor cuidado y mantenimiento de tu equipo.

RECOMENDACIONES

- Guarda la garantía y factura en un lugar seguro.
- Verifica el funcionamiento de los drops o secciones ajustables, asegurando que no haya bloqueos o ruidos extraños.
- Revisa periódicamente el sistema eléctrico (cables, pedales, motor) para asegurarte de que no haya desgaste ni falsos contactos.
- Coloca el equipo en una zona seca.
- Mantenga limpio el vinil (Limpie con un trapo húmedo)
- No sobrecargues la camilla. Respeta el peso máximo recomendado por el fabricante.
- Utiliza el control de pie con movimientos suaves y evita presionarlo continuamente por largos periodos.
- Asegúrate de que todas las secciones estén fijas* antes de iniciar una terapia de manipulación.

Contacto



zarmex.mexico@gmail.com



55 8136 6555




zarmexoficial.com



soporte.zarmex@gmail.com



Organillero 317 Benito Juárez
Nezahualcóyotl, 57000 Ciudad de
México, Méx.

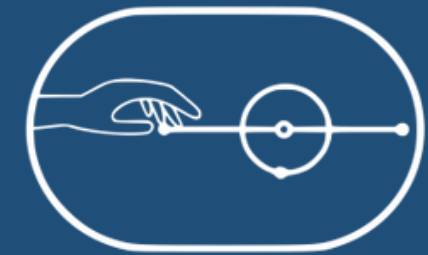

ZARMEEX
UN CONCEPTO DE CALIDAD



ZARME

UN CONCEPTO DE CALIDAD