

MANUAL DE USUARIO

ZAR - CQP - 012

Quiropráctica

Zarmex Oficial

ZARMEX

Ofrecemos calidad en cada uno de nuestros productos y servicios

Zarmex inició ofreciendo servicios médico-dentales y de optometría. Con el tiempo, ha expandido su catálogo a áreas como podología, quiropráctica, otorrinolaringología, ginecología y fisioterapia. Su crecimiento ha sido impulsado por la innovación y la calidad en la manufactura y mantenimiento de equipos médicos.

TÚ GUÍA INTERACTIVA

Nuestro manual incluye un menú dinámico diseñado para facilitar tu experiencia de navegación. A través de él, puedes acceder rápidamente a las secciones que necesites sin tener que buscar manualmente. Solo haz clic en el título o apartado que te interese, y serás dirigido directamente a esa parte del documento.

MENÚ

[INTRODUCCIÓN](#)

[PIEZAS](#)

[INSTALACIÓN](#)

[GARANTIA](#)

[MANTENIMIENTO](#)

[RECOMENDACIONES](#)

[CONTACTO](#)

BIENVENIDO A LA EXPERIENCIA ZARMEX

¡Gracias por adquirir nuestro equipo!

Te compartimos tu manual el cual ha sido diseñado para proporcionarte una guía clara y concisa sobre el uso, mantenimiento y características técnicas del modelo descrito, tu equipo está pensado para ofrecer comodidad, eficiencia y durabilidad en entornos profesionales.


Te recomendamos leer detenidamente tu manual antes de su uso para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro.

PÓNLO EN MARCHA EN MINUTOS

En Zarmex, pensamos en tu comodidad desde el primer momento. Por eso, entregamos cada equipo completamente ensamblado, listo para usarse, sin que tengas que preocuparte por armado o instalación complicada.

Sabemos que tu tiempo es valioso, nuestro objetivo es que recibas un equipo práctico, funcional y sin complicaciones, como debe ser. En Zarmex, estamos contigo en cada paso.

TU EQUIPO ZARMEX PIEZA POR PIEZA

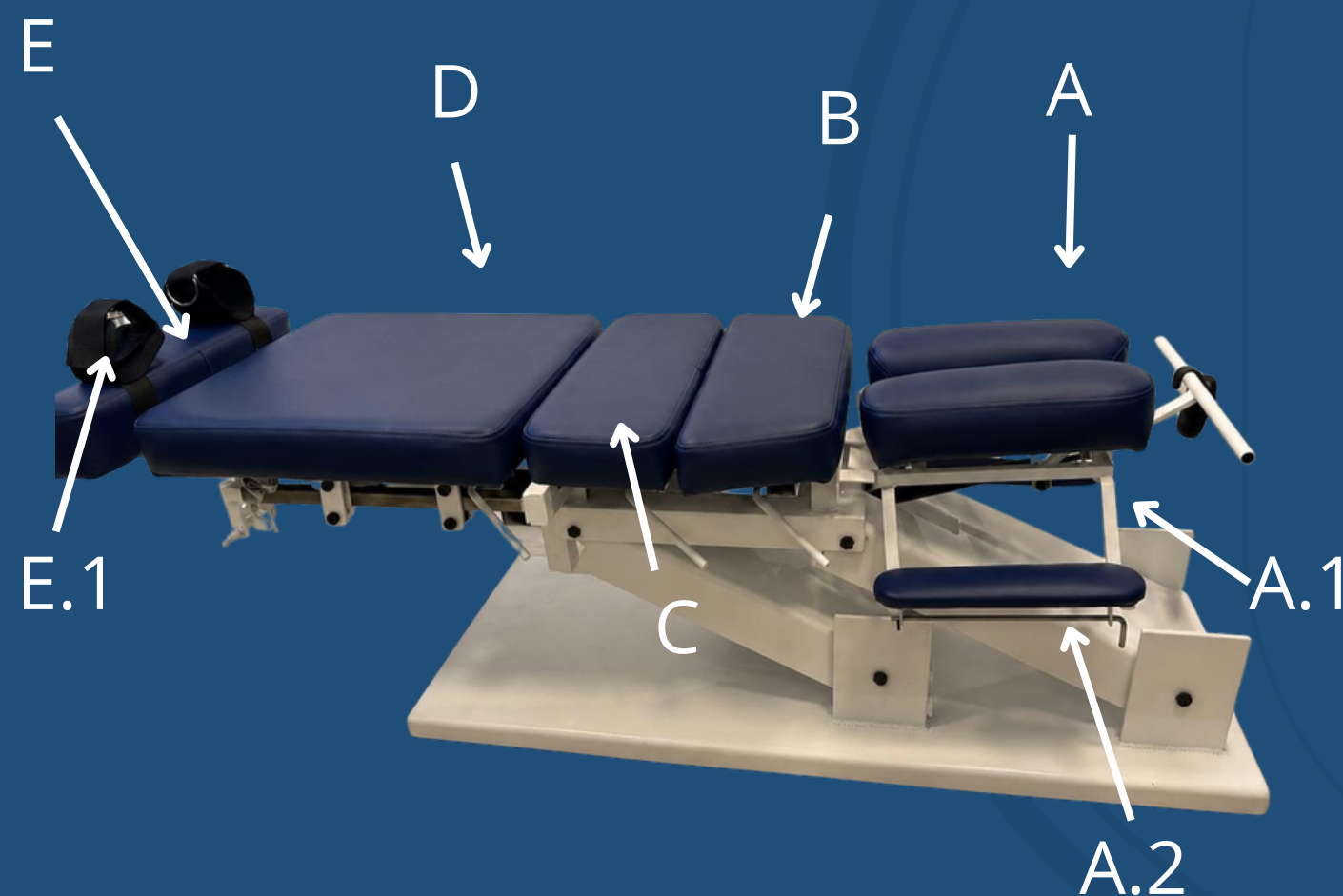

A. Sección Cervical: Cuenta con drop cervical a 45°. Su acojinamiento brinda comodidad durante tratamientos prolongados. **A.1:** Cuenta con pistón para movimientos de flexión y extensión cervical. **A.2:** Porta papel facial


B. Sección Torácica: Incluye drop torácico que se activa mediante palancas y perilla, permite una caída controlada al aplicar presión.

C. Sección Lumbar: Posee un drop lumbar que se activan mediante perilla y palancas permitiendo realizar ajustes específicos.

D. Sección pélvica: Drop pélvico con activación de palancas y perilla. Movimiento pélvico para tracción lumbar hasta 15 cm a través de control manual.

E. Piecera extensible: Es extensible hasta 15 cm, adaptándose a diferentes estaturas. **E.1:** Tobilleras sujetadoras para el paciente.

TU EQUIPO ZARMEX PIEZA POR PIEZA

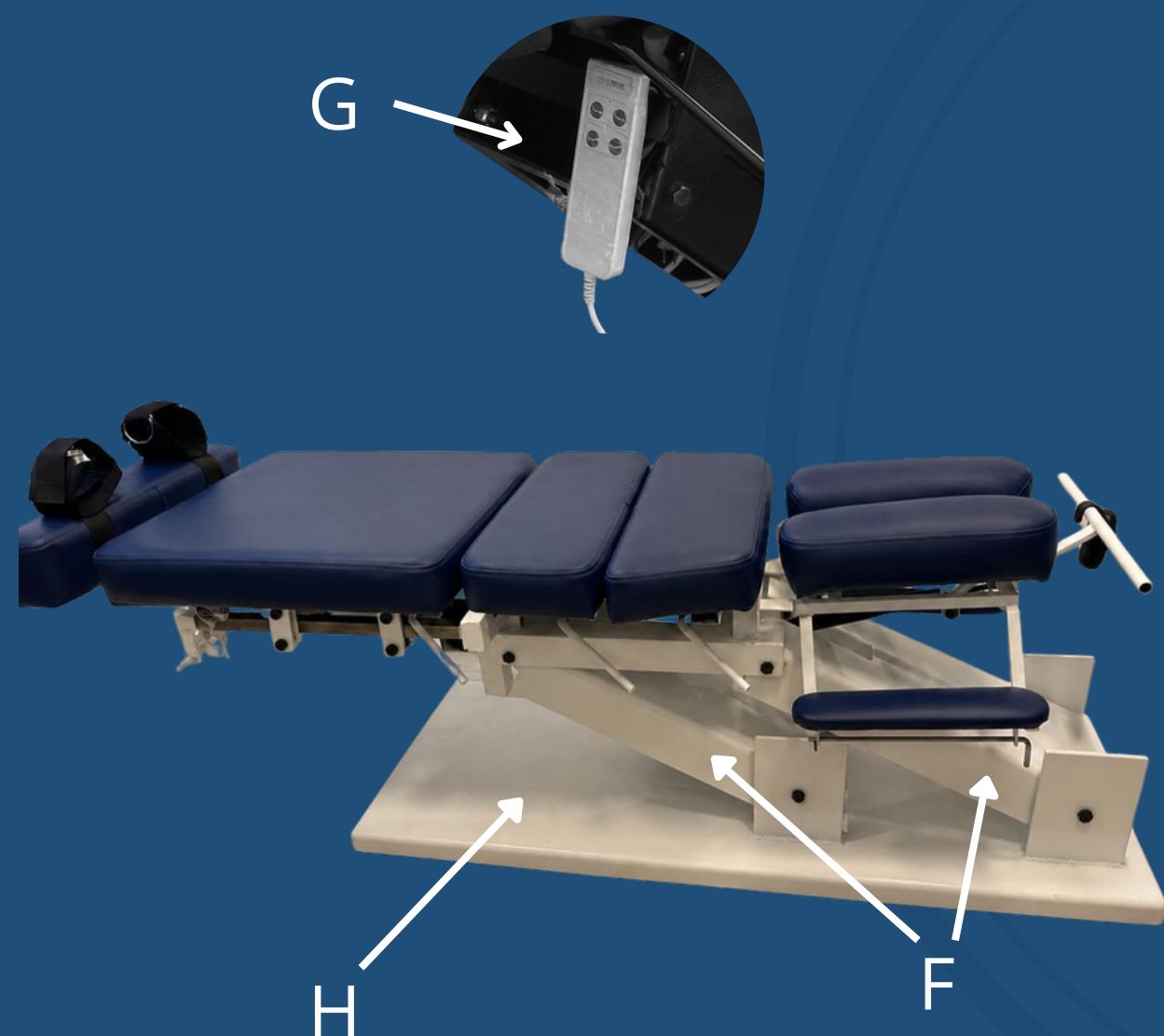

F. Sistema de Elevación Eléctrica: Eleva o descende toda la camilla de 55 cm a 80 cm. Se activa mediante control de mano y cuenta con motor que realiza movimientos suaves y silenciosos.

G. Control de Mano: Permite realizar los movimientos de tracción ascenso y descenso de la mesa de manera sencilla. Sustituye al control de pie, proporcionando mayor comodidad en espacios reducidos.

H. Base Metálica: En la estructura se integra el mecanismo de tracción y motor garantizando estabilidad y seguridad durante los movimientos dinámicos.

GARANTÍA

Condiciones

- Es necesario presentar la póliza, la factura o nota de compra y llevar el producto a la dirección de ZARMEX.
- Para más información ZARMEX se compromete a reparará o sustituirá el producto o sus piezas defectuosas sin costo, incluyendo el envío o transporte.
- ZARMEX se reserva al derecho a remplazar el equipo.

Duración

La garantía ofrecida por ZARMEX tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de compra, y cubre todas las partes del producto contra defectos de fabricación o fallas en su funcionamiento.

Anulación:

La garantía se pierde por mal uso, no seguir el instructivo o reparaciones no autorizadas.

Exclusiones:

No cubre daños por voltaje, mal uso, desgaste normal o falta de documentos.

Condiciones extra:

ZARMEX puede enviar un técnico o dar un equipo provisional si aplica. No se aceptan garantías verbales.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO

En nuestra página web contamos con una sección específica donde puedes detallarnos el problema que presenta el modelo. Una vez recibido tu mensaje, nos comunicaremos contigo de inmediato para brindarte una solución.

Mantenimiento preventivo :

Se recomienda realizar mantenimiento básico regularmente: limpiar el polvo, revisar tornillos.

Limpieza:

Zarmex recomienda que, para una mejor limpieza de tu equipo, especialmente en las áreas forradas con vinil, utilices silicón en crema o productos base en crema y un trapo de microfibra. Esto garantizará un mejor cuidado y mantenimiento de tu equipo.

RECOMENDACIONES

- Guarda la garantía y factura en un lugar seguro.
- Usa el equipo solo para su propósito original.
- Revisa tornillos y partes móviles regularmente.
- Coloca el equipo en una zona seca.
- Mantenga limpio el vinil (Limpie con un trapo húmedo)
- Desconectar la camilla de la corriente eléctrica cuando no se utilice o al realizar mantenimiento.
- Comprobar los drops manuales (pélvico, torácico y cervical) antes de iniciar el tratamiento, asegurando que funcionen con suavidad y sin obstrucciones.
- Proteger la camilla de la humedad directa o exposición solar prolongada, para evitar la corrosión del metal y el deterioro del tapizado.

Contacto



zarmex.mexico@gmail.com



55 8136 6555




zarmexoficial.com



soporte.zarmex@gmail.com



Organillero 317 Benito Juárez
Nezahualcóyotl, 57000 Ciudad de
México, Méx.

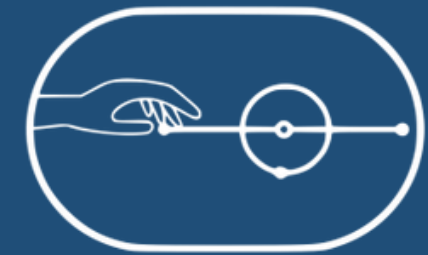

ZARMEEX
UN CONCEPTO DE CALIDAD



ZARME

UN CONCEPTO DE CALIDAD